




Wundversorgung Post-OP (ProntoVet® / Askina®)

Es liegt in Deinen Händen –
Infektionsprävention in der Tiermedizin



Wunde


Wundversorgung Post-OP

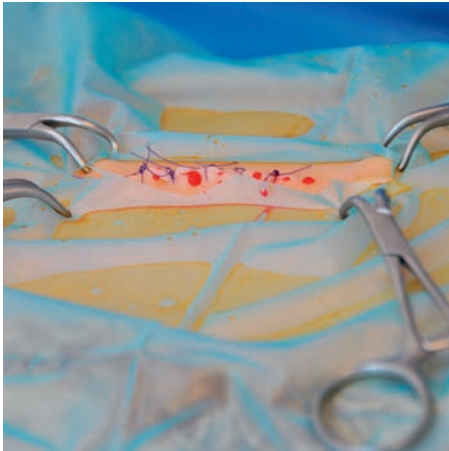


Nach dem Wundverschluss wird die Abdeckung entfernt.



Die Wunde wird mit ProntoVet® Wundspüllösung gereinigt.

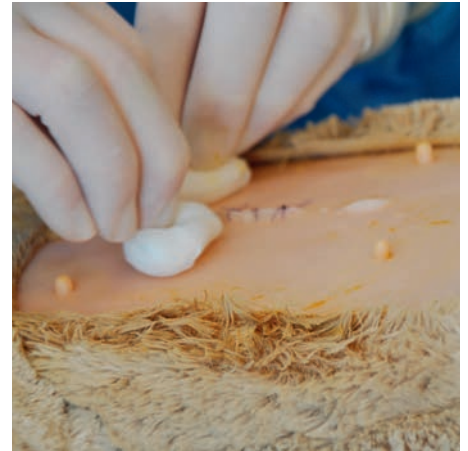


Damit die Wundabdeckung (Askina® Soft) gut haftet, sollte nach einer Minute der Randbereich mit einem sterilen Tupfer getrocknet werden.

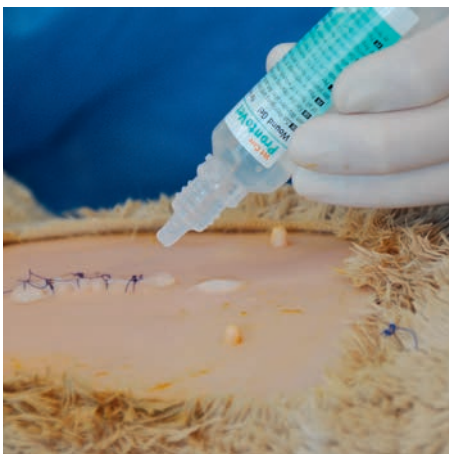

Die Wunde ist für 24 Std. noch durchlässig für Bakterien. Es empfiehlt sich daher, auf die Wunde ProntoVet® Wundgel aufzutragen.



Danach erfolgt eine sterile Wundabdeckung mit Askina® Soft.

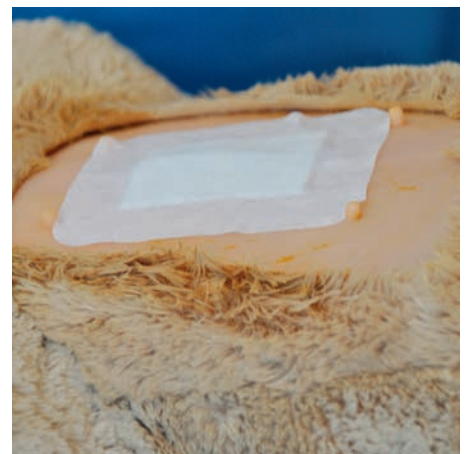

Um die Wunde optimal vor Kontamination zu schützen, sollte der Verband für mindestens 24-48 Std. auf der Wunde verbleiben.



Mehr Informationen, dieses Poster und noch vieles mehr finden Sie unter:
www.bbraun-vetcare.de/indeinenhaenden