

Anwendungshinweise für Caresite Membranventile

Drei einfache Schritte in der Anwendung

1. Händedesinfektion



- Hygienische Händedesinfektion.
- Anlegen von Untersuchungshandschuhen.

2. Desinfektion der Membranoberfläche



Desinfektion innerhalb des orange markierten Bereichs

- Gründliche Wischdesinfektion der Membranoberfläche und deren Umgebung mit einem Alkoholtupfer; die Einwirkzeit von 15 Sekunden muss eingehalten werden.
- Lassen Sie das Desinfektionsmittel trocknen.

3. Verbinden und Dekonnektieren



- **WICHTIG:** Die Leitung nicht abklemmen, bevor die Spritze dekonnektiert wurde.
- Evtl. Restfeuchtigkeit auf der Membranoberfläche mit einem sterilen Tupfer aufnehmen.

Bitte beachten

- Vor jeder Konnektion das Ventil gründlich mit einem Alkoholtupfer für 15 Sekunden desinfizieren. Wir empfehlen dazu Softa® Cloth.
- Vor und nach Medikamentenapplikation oder Blutentnahme spülen.
- Membranoberfläche nach jedem Blutentnahmeprozess desinfizieren.
- Standzeiten des Membranventils entsprechend den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zur Prävention Gefäßkatheter-assoziiertes Infektionen bzw. den hausinternen Hygienerichtlinien.

Softa® Cloth CHX 2%, Art. Nr.: 19581



Mehr Informationen zur Risikoprävention in der Infusionstherapie unter: www.sichereinfusionstherapie.de